

! Montera Crossit på samma sätt i baksätet som i framsätet.



Axelbanden kan också låsas utan att banden korsas. Vid val av denna montering rekommenderas att ett bröstlås monteras för att undvika att axelbanden glider ner över axeln.

! Ha alltid ett säkerhetsbälte utanpå ett positioneringsbälte!



Crossitbältet



Crossit artikelnr 40000



Extra tillbehör



Sittdyna artikelnr 40001



Bröstlås artikelnr 40123

Höftband artikelnr 40002

CROSSIT

CROSSIT är en universell bälteslösning utvecklad för alla er som kör i taxi, färdtjänstfordon, skolbussar och andra fordonstyper.

Med Crossit monterad i ditt fordon finns alltid en bälteslösning monterad och klar att använda när en passagerare behöver extra stöd eller fixering, oavsett om det gäller ett barn eller en vuxen.

Crossit är ett smidigt bältesalternativ som är integrerat med bilsätet: det behöver alltså inte flyttas och hindrar inte andra passagerare från att sitta bekvämt.

Crossit monteras utan påverkan på fordonet och kan användas i olika typer av säten och stolar. Lösningen kräver att sätet eller stolen har en öppning mellan sits och rygg (t.ex. rullstolar och fåtöljer). Crossit kan monteras i både fram- och baksäte utan problem.

Crossit är CE märkt.

! **Självklart skall fordonets säkerhetsbälte alltid användas.**

Crossit
en universell bälteslösning



CROSSIT
Monteringsanvisning

Careva Systems AB Theres Svenssons gata 10,
S-417 55 Göteborg, info@careva.se,
tel +46 70 33 40 300 www.careva.se

- 1** Lossa de båda svarta plattorna från skivan som de varit monterade på. Trä den översta plattan (försedd med logotype) över nackstödet. OBS! Se till att det gula bandet ligger framför infästningarna till nackstödet.



- 2** Ta bort de klämmor och omtag som fäster bältesbanden.



- 3** Fatta den nedre svarta plattan (saknar logotype) och skjut den genom öppningen mellan sits och rygg.

Detta är ofta ett trångt mellanrum men den svarta plattan och de långa banden skall föras igenom öppningen till baksidan av bilstolen.



Observera att de korta banden skall vara kvar på framsidan av bilstolen.

- 4** Dra igenom bältesbanden i hela dess längd. Montera sedan bältesbanden i den övre svarta plattan som bilden visar.



- 5** Fixera bältet ordentligt kring ryggstödet genom att dra hårt i båda banden samtidigt.

OBS! Se till att den nedre svarta plattan placeras i nederkant på ryggstödet. Dra åt båda banden så att bältet sitter ordentligt fast runt sätesryggen.



- 6** Montera slutligen de svarta omtagen kring båda banden för att undvika lösa bältesband.

- 7** Placera Crossit sittedyna ovanpå bilkudden (med antihalk-materialet mot bilkudden för att förhindra glidning). Sittedynan kan om så önskas monteras fast i de långsgående bältesbanden, se bild.



Sittedynan är försedd med bältesband som används i de fall barnet kräver fixering av höfter och eventuellt också fixering över låren.

- 8** Lossa omtagen för axelbanden och anpassa höjden till barnets storlek. Axelbanden skall utgå strax ovanför axeln och korsas över bröstkorgen.



- 9** Lås fast de korsade axelbanden i det lås som har samma markering som markeringen på axelbandet (1 gul träns).



- 10** Korsbanden från sittedynan över låren och lås fast dem i de lediga låsen på vardera sida.